

RESP@RATE[®]

TO LOWER
BLOOD PRESSURE

Cher client acquéreur de RESPeRATE,

Félicitations pour votre achat de RESPeRATE!

Sur les conseils de mon équipe professionnelle, je vous suggère d'utiliser votre appareil RESPeRATE 15 minutes par jour pour réduire durablement votre tension artérielle tout au long de la journée, et ce, au bout de 3 à 4 semaines à peine.

Votre objectif est le nôtre. Nous mettons nos services à votre disposition pour vous aider à atteindre une tension artérielle saine. N'hésitez pas à nous appeler pour nous informer de votre façon de procéder ou pour nous faire part de votre expérience personnelle sur notre forum des utilisateurs à l'adresse:

www.resperate.com/forum.

Votre médecin connaît-il les bienfaits de RESPeRATE?

Si vous n'avez pas déjà échangé l'information avec votre docteur, nous vous recommandons de le faire. Vous pouvez appeler notre service d'assistance clientèle pour demander une brochure d'information clinique à transmettre à votre médecin traitant ou lui communiquer l'adresse Internet de notre site, établie à l'intention du personnel médical:

www.resperate.com/clinicians

La sécurité avant tout! Les consignes de sécurité mentionnées au verso de cette page sont essentielles. Veuillez les lire attentivement et les appliquer avec soin.

Bon rétablissement avec RESPeRATE!



Marguerite A. Barlovic

Directrice du service clientèle, InterCure Inc.

RESPeRATE ne doit être utilisé que comme complément à votre thérapie générale pour rétablir votre tension artérielle selon les prescriptions de votre médecin. RESPeRATE peut être utilisé en toute sécurité en combinaison avec un traitement médicamenteux et quelques modifications dans votre mode de vie: par ex. un régime adapté et un peu d'exercice.

La sécurité avant tout !

- N'utilisez pas cet appareil sans consulter votre médecin auparavant si vous souffrez ou avez déjà souffert de l'une des maladies suivantes: cardiopathie ischémique active/ angine instable, insuffisance cardiaque congestive grave, fibrillation auriculaire chronique, attaque suivie d'une déficience permanente, insuffisance rénale chronique, asthme sévère, pneumopathie chronique obstructive, par exemple bronchite chronique et emphysème, déficience organique grave ou paralysie du sommeil.
- InterCure vous recommande vivement de ne pas modifier votre traitement contre l'hypertension sans l'avis et le consentement préalable de votre médecin.
- N'utilisez pas votre appareil RESPeRATE lorsque vous devez rester éveillé ou concentré, ni en cas de manipulation ou d'utilisation d'équipements lourds. N'utilisez pas RESPeRATE en conduisant.
- Si vous constatez un quelconque effet secondaire, le moindre changement dans votre état de santé général ou si vous ressentez un changement d'humeur, interrompez immédiatement l'utilisation de votre appareil RESPeRATE, et contactez votre médecin.
- Respirez sans effort pendant vos exercices. Une respiration trop profonde est susceptible de provoquer un vertige et/ ou des palpitations.
- Il est déconseillé d'utiliser le RESPeRATE à son volume maximum (97 dBA) pendant plus de deux heures par jour.
- **Ne pas utiliser cet appareil si vous êtes allergique en latex de caoutchouc naturel (LCN) car ce produit contient du LCN. La respiration Sensor doit être effectuée sur les vêtements.**
- L'indication du taux de respiration "bpm" ne doit pas être utilisée pour prendre une décision. Il sert à donner un suivi pendant l'exercice respiratoire.
- RESPeRATE Duo model' users: Veuillez changer les écouteurs avant de permettre à une autre personne d'employer l'appareil.

Nous nous engageons à baisser votre hypertension artérielle.

Contact | 0826-46 00 06 (prix d'un appel national) | www.kiria.com | Courriel: infos@kiria.com